

**Gebrauchsanweisung**  
**Primavette®**  
**Blutprobenentnahmesystem**  
**bei Schwarzwild**


Grund: Verschmutzung der Blutproben durch Innereien soll vermieden werden, da die Proben sonst nicht auswertbar sind.

# Blutentnahmesystem




Enthalten im Set:

- ✓ steril verpackte Kanüle
- ✓ Primavette ®
- ✓ weiße Verschlusskappe
- ✓ Versandhülse


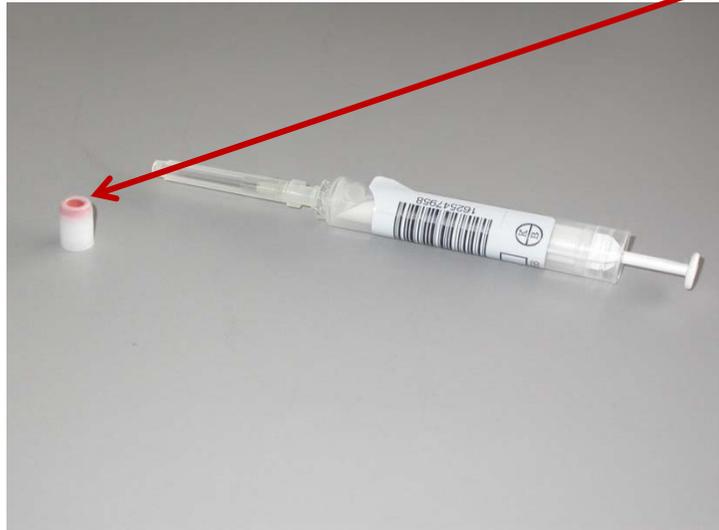


- Entfernen der Verschlusskappe (☞ Wichtig: Kappe nicht wegwerfen!)
- Kanüle aufsetzen und Kanülenschutzkappe entfernen

- Herzkammer oder ein geschlossenes Gefäß punktieren und das Blut langsam bis zum Einrasten aufziehen

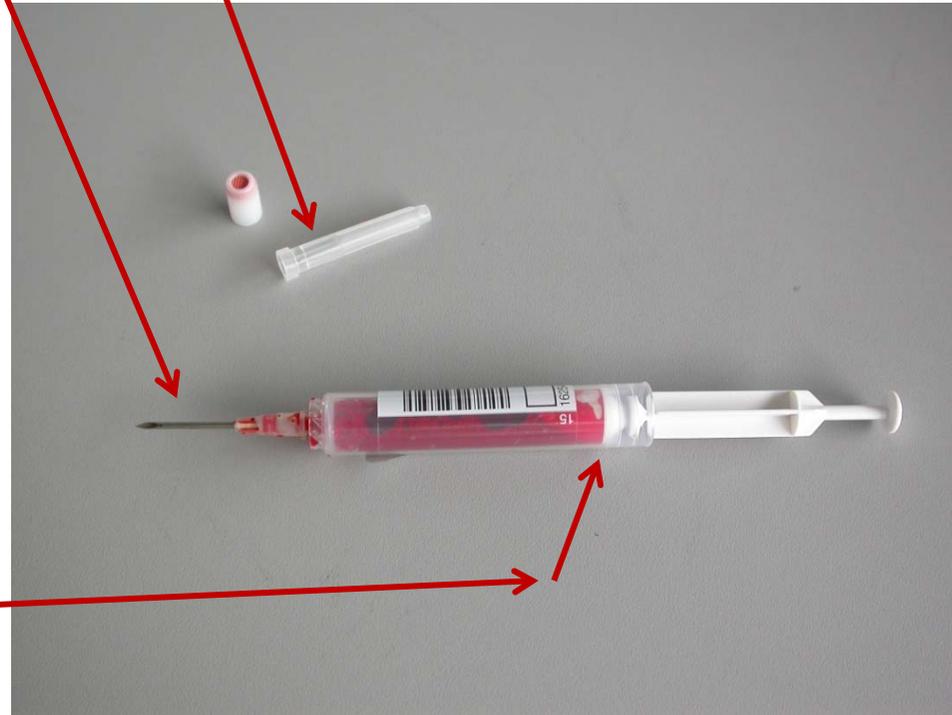

# Möglicher „guter“ Entnahmeort

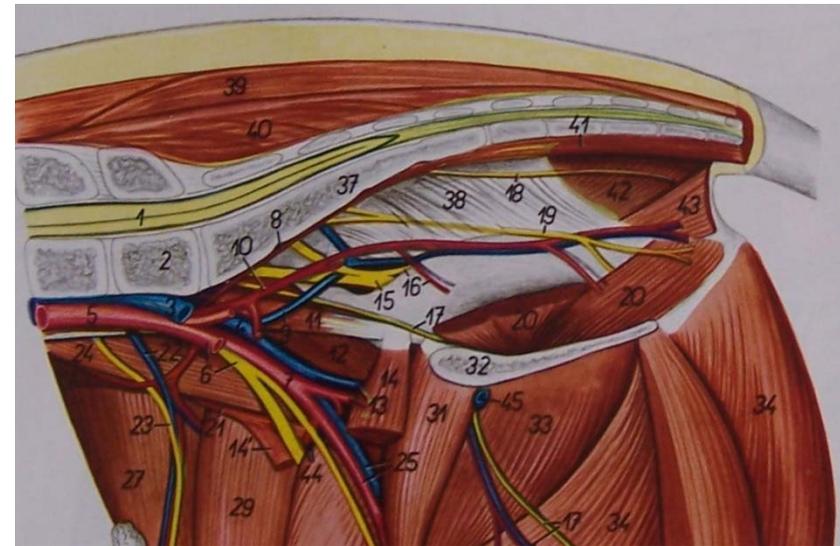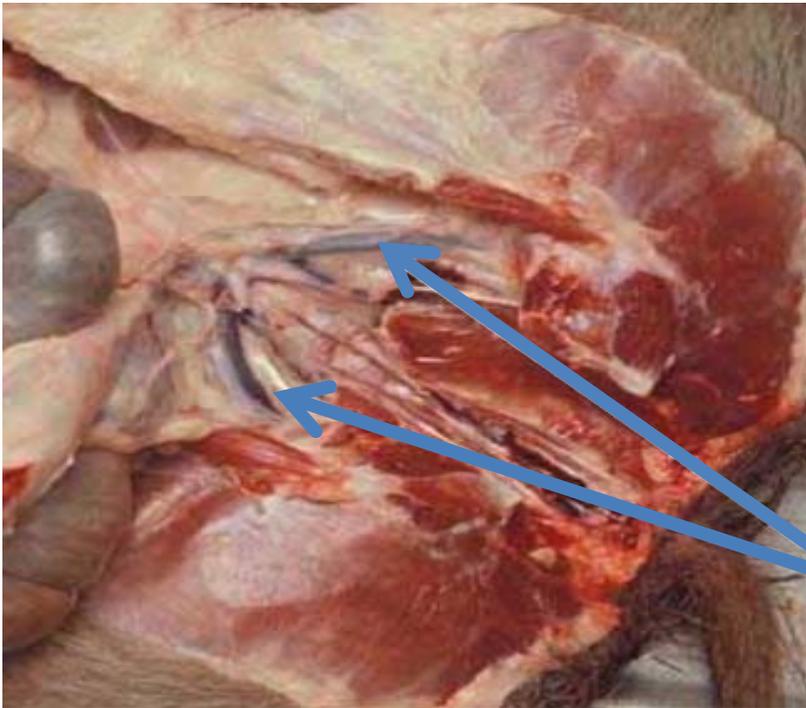

Aus: Popesku, P., Atlas der topographischen Anatomie, 1993

V. iliaca externa sinistra et  
dextra (linke und rechte  
äußere Darmbeinvene)  
„Brandvene“



- Jetzt die Kolbenstange abbrechen
- Kanüle entfernen und an deren Stelle die Verschlusskappe aufsetzen



- ☞ Auf das „Einrasten“ der Kappe achten!
- In die Versandhülse packen !

- Kanüle wieder in Hülse stecken und im Hausmüll entsorgen



**komplettes (gefülltes) Röhrchen in Plastikröhrchen stecken, zuschrauben und in Plastiktüte verpacken, bei Raumtemperatur (20-25°C) lagern und schnellstmöglich (innerhalb von 2-3 Tagen) beim Kurierstützpunkt des Veterinäramtes abgeben**